

## Сведения о сертификации

Кресло-коляска для инвалидов «Armed» FS980LA соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС CN.HO03.B03670 действителен с 27.11.2009 г. по 09.02.2012г.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/03690 действительно с 12.11.2009 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,**  
**«Фошан Донгфэнг Медикал Мануфактори», (Лтд), Китай,**  
**5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City,**  
**China**

**Дистрибьютор: ТМ «Армед»**  
Тел. в г. Москве: (495) 411-99-33  
Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02  
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов «Armed» FS980LA –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

### Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 725-04-37

г. Санкт-Петербург: (812) 327-62-54

г. Екатеринбург: (343) 368-11-22

Сайт: [www.armed.ru](http://www.armed.ru)



## Кресло-коляска для инвалидов

**Мод. FS980LA**

### Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям.

## 1. Основные технические характеристики

Длина в рабочем состоянии, мм	1050
Ширина в рабочем состоянии, мм	650
Ширина в сложенном состоянии, мм	260
Высота, мм	920
Высота сиденья, мм	510
Ширина сиденья, мм	460
Глубина сиденья, мм	430
Диаметр колес передние/задние, "	8/24
Масса, кг	15
Грузоподъемность, кг	120♦1

## 2. Комплект поставки

1. Кресло-коляска \_\_\_\_\_ 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации \_\_\_\_\_ 1 шт.
3. Съёмная подушка сидения и спинки из ткани с повышенным воздухообменом \_\_\_\_\_ 1 шт.
4. Ремни крепления.

## 3. Указание мер безопасности

При посадке больного в кресло-коляску «Armed» FS980LA и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставлять на подножки. Которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

## 4. Подготовка кресла-коляски к эксплуатации

### а) Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска «Armed» FS980LA складывается и раскладывается без инструмента.

Для складывания кресла-коляски следует встать сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потянуть на себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-коляску, просто потянув сиденье вверх.

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья к раме.

### б) Опоры для ног:

Кресло-коляска комплектуется съёмными, регулируемыми по высоте и поворотными опорами.

Для установки опор на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия опор необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть опору в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

### в) Тормоза:

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

### г) Колеса:

Кресло-коляска комплектуется быстросъемными задними колесами с кнопочной фиксацией, имеющими задние пневматические и передние литые шины. Также имеет регулировку колесной базы (регулировка кресла по высоте)

### д) Подлокотники:

Подлокотники откидные убираются за спинку сиденья. Перед снятием подлокотника отжать фиксирующий рычаг, расположенный сзади от переднего паза для вставки подлокотника.

### е) Рама:

Рама коляски изготовлена из алюминиевых труб с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию

### ж) Спинка:

Дополнительный складной задний фиксатор рамы

## 5. Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-коляска «Armed» FS980LA требует определенного технического ухода.

Обивку сиденья и спинки из ткани с водоотталкивающей пропиткой и подлокотники из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором хлорамина.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.